



車いす点検表

様

No. _____

車いすの特徴 (あてはまるところに○をつける)			
型式	普通型	介助型	モジュラー
機能	リクライニング	ティルト	その他()
脱着可能部位	アームサポート	フットサポート	その他()
その他特記			

部位	点検内容	年 月 日点検		年 月 日点検		年 月 日点検	
		点検者()		点検者()		点検者()	
		問題あり○	修理済日	問題あり○	修理済日	問題あり○	修理済日
車輪関係	タイヤの空気圧						
	タイヤの傷・磨耗状態						
	車輪の汚れ						
	車輪のゆがみ・ガタつき						
	ハンドリムのゆがみ・ガタつき						
	キャスターのゆがみ・ガタつき						
	その他						
ブレーキ	ブレーキの効き具合						
	レバーの動き						
	ブレーキの汚れ						
	その他						
シート・フレーム	シートの汚れ・破れ						
	フレームの汚れ・さび・破損						
	ネジのゆるみ・紛失						
	車いす折りたたみ時の動き不良						
	座シートの収まりが不安定						
	その他						
フットサポート	フットサポート左右の位置のズレ						
	フットサポート折りたたみ時の動き不良						
	フットサポートの汚れ・破損						
	その他						
その他機能	ティルト・リクライニングの動き不良						
	脱着可能部位の動き不良						
	脱着可能部位のロック不良						
	その他						

問題のある所に
点検日と○印を

